


دستورالعمل استفاده و راه اندازی دستگاه تشک موج مدل MS-2220

روز بر شما خوش ؛

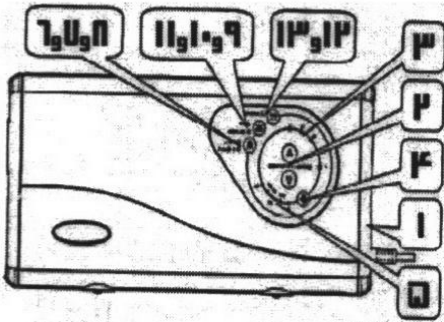

ابتدا به وسیله شکل روبرو کاربرد قسمت های مختلف پمپ را مرور می کنیم .

۱- کلید روشن On و خاموش Off

۲- کلید های ویژه جهت افزایش یا کاهش فشار هوای مورد نظر (تنظیم فشار هوای پمپ)

۳- نشانگرهای میزان فشار هوا

۴- کلیدهای ویژه تنظیم دوره زمان حرکت سیکل گردش (قابل تنظیم روی سه زمان ۱۰، ۱۵ و ۲۰ دقیقه)

۵- نشانگر زمان دوره تناوب پمپ

۶- کلید سکوت (Mute) جهت قطع صدای آلارم های فشار خروجی و قطع جریان برق

۷- نشانگر کاهش فشار (این آلارم در زمان نشستی و یا عدم تنظیم صحیح فشار خروجی متناسب با وزن بیمار فعال می گردد)

۸- نشانگر قطع جریان برق (POWER) . این آلارم در زمان قطع جریان برق فعال می گردد .

۹- فعال کننده آلترناتیو (با فعال شدن این گزینه تشک طی سیکل زمانی تایین شده پر و خالی می گردد) .

توجه : در حالت عادی و زمانی که تخت بیمار دارای پوزیشن نیست پمپ دستگاه باید در حالت آلترناتیو باشد .

۱۰- نشانگر آلترناتیو (در زمان فعال بودن حالت آلترناتیو این نشانگر روشن است)

۱۱- نشانگر L. A.T (استاتیک) . از این نشانگر در زمان پوزیشن دادن به تخت بیمار مثل مواقع فیزیوتراپی ، غذا دادن ، نشستن و ... استفاده می گردد.

۱۲- کلید Auto Firm (در زمان شروع به کار اولیه ، برای پر شدن کامل تشک این کلید باید فعال گردد)

۱۳- نشانگر Auto Firm (در زمان فعال بودن کلید شماره ۱۲ این نشانگر روشن می باشد)

مراحل نصب :

مرحله اول- پس از اتصال تشک به پمپ ، از بسته بودن CPR اطمینان یابید سپس کلید on/off به حالت روشن درآوردید صدای ییب شنیده می شود .

مرحله دوم- پس از روشن شدن پمپ فعال می شود و سپس پمپ در حالت استاتیک با فشار هوای ۱۲ میلی متر جیوه شروع به هوادهی به تشک می نماید . پس از رسیدن به فشار مناسب می توان حالت آلترناتیو را فعال نمود . برای رسیدن به حالت آلترناتیو حداقل ۱۵ دقیقه زمان نیاز می باشد . لازم بذکر است که اگر فشار در مدت زمان ۴۵ دقیقه به سطح ۱۲ میلیمتر جیوه نرسد صدای آلارم هشدار دهنده به معنای فشار کم (Low Pressure) به گوش خواهد رسید .

در این حالت لطفاً کلید Mute (۵) را فشار داده تا صدای آلارم هشدار دهنده قطع گردد چراغ نشانگر Low Pressure تا رسیدن به فشار نرمال روشن خواهد ماند .

مرحله سه - برای رسیدن به میزان فشار دلخواه و نیز دوره تناوب زمان گردش پمپ، از روی پنل دیجیتال انتخاب خود را انجام دهید .

مرحله چهارم - برای انتخاب حالت استاتیک کلید L.A.T را فشار دهید چراغ نشانگر L.A.T روشن خواهد شد و برای فعال سازی حالت آلترناتیو همان کلید را مجدداً فشار دهید .

نکته (در حالت استاتیک تشک حالت مطمئن تری را برای جایجا کردن یا انتقال بیمار فراهم می سازد . همین طور در صورتی که بیمار بایسد روی تشک بنشیند حتماً تشک را به حالت استاتیک درآوردید .

نکته (دستگاه پس از ۲ ساعت کارکرد در حالت استاتیک به صورت اتوماتیک به حالت آلترناتیو باز خواهد گشت تا در صورت فراموشی ، هیچگونه آسیبی به بیمار نرسد .

نکته (از بستن تسمه تشک به بدنه غیر متحرک تخت خودداری فرمایید تا در زمان پوزیشن دادن تشک دچار پارگی نشود.

در صورت عدم رعایت هشدارهای ایمنی از جمله نحوه صحیح کارکرد با دستگاه ، CPR و شستشو،

دستگاه از شمول گارانتی خارج می گردد .