



- ۱- ناب: برای جابجایی بین گزینه ها و نمودارها از چرخش و برای انتخاب از فشردن این دکمه استفاده کنید.
- ۲- کلید روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۳- نشانگر باتری: در صورت روشن بودن نشان می دهد که دستگاه از باتری داخلی استفاده می کند
- ۴- دکمه NIBP: جهت شروع و یا اتمام عملیات گرفتن فشارخون
- ۵- دکمه Main: برای خارج شدن از منو و بازگشت به صفحه اصلی
- ۶- دکمه Silence: برای ساکت کردن آلارم به صورت موقت یا دائم (فشاردن دکمه بیش از ۲ ثانیه)
- ۷- دکمه Freeze: جهت ثابت کردن شکل موج (فریز) و نیز خارج شدن از این وضعیت
- ۸- دکمه Record: غیر فعال است
- ۹- دکمه Menu: برای ورود به منوی سیستم از این دکمه استفاده نمایید
- ۱۰- نشانگر برق شهر: در صورت وصل بودن برق شهر این نشانگر روشن می شود

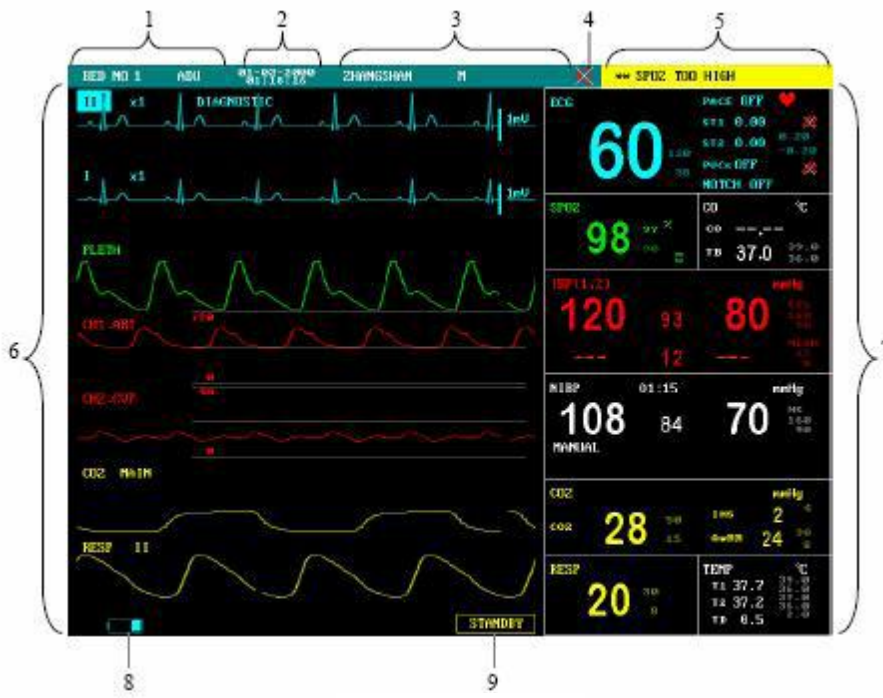

صفحه نمایش

- ۱- ناحیه اطلاعات بیمار
- ۲- زمان سیستم
- ۳- ناحیه آلارمهای فنی
- ۴- نشانگر صدای سیستم
- ۵- ناحیه آلارمهای فیزیولوژیک
- ۶- ناحیه شکل موجها
- ۷- پنجره پارامترها
- ۸- ناحیه اطلاعات فوری و وضعیت باتری
- ۹- نشان Standby

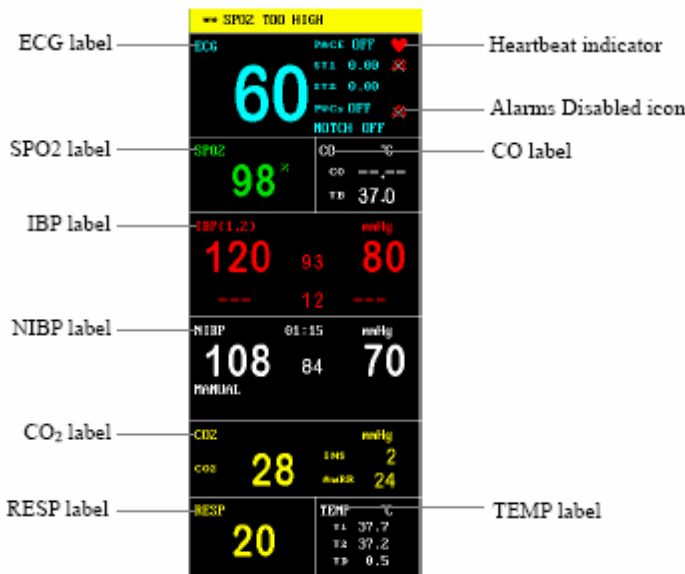

پنجره پارامترها

تمیز کردن مانیتور

سطح خارجی دستگاه را می توان با پارچه نرم و تمیز و به کمک محلولهای ذیل تمیز نمود:

- ۱- آب و صابون رقیق
- ۲- آب و آمونیاک رقیق
- ۳- آب ژاول رقیق شده (سفید کننده)
- ۴- فرمالدئید رقیق شده (۳۵-۳۷٪)
- ۵- آب اکسیژنه (۳٪)
- ۶- اتانول / ایزوپروپانول (۷۰٪)

ضد عفونی کردن سیستم

ضد عفونی کردن می تواند سبب آسیب به سیستم شود. توصیه می شود ضد عفونی طبق قوانین بیمارستان و تنها در موارد ضروری صورت گیرد. مواد ضد عفونی کننده توصیه شده: موادی که بر پایه الکل (اتانول ۷۰٪ یا ایزوپروپانول ۷۰٪) یا موادی که بر پایه آلدئیدها هستند.