



راهنمای سریع سونی کید

۱- دستگاه حتماً بر روی لاکر قرار گیرد و از نزدیکی آن با لوازم الکترونیکی و مایعات خودداری شود.

۲- **دستگاه از برق جدا شود تا با باتری کار کند.** برای استفاده از دستگاه لازم است ژل مخصوص بر روی شکم فرد قرار گیرد. حال **ابتدا** پروب را از جایگاه بیرون بیاورید و **سپس** دستگاه را روشن کنید.

۳- از کشیدن کابل پروب و ضربه به پروب جدا خودداری شود و پس از هربار استفاده از دستگاه باقیمانده ی ژل روی پروب حتماً تمیز گردد (ترجیحاً با پنبه و الکل).

۴- روشن شدن هشدار نوری وضعیت باتری نشان دهنده ی این است که دستگاه باید به برق وصل شود تا باتری شارژ شود.

۵- پس از هربار استفاده از دستگاه، ابتدا آن را خاموش نمایید و سپس پروب را در جایگاه قرار دهید.

۶- **اکیداً تأکید می شود در پایان هرروز کاری دستگاه را جهت شارژ به برق متصل کنید و در طول روز (ساعات کار) دستگاه از برق جدا باشد و با باتری کار کند.**