



## راهنمای سریع گوشی معاینه

گوشی معاینه یا استتوسکوپ طبق شکل متشکل از دیافراگم، لوله ی پلاستیکی، دو کمان فلزی و پوارهای قرارگیرنده در گوش می باشد.

### نکات کلیدی :

- ۱- به صفحه ی شفاف دیافراگم نباید ضربه ای وارد شود.
- ۲- رابط بین دیافراگم و لوله ی پلاستیکی نباید چرخانده شود. این امر موجب عدم تشخیص صدا می شود.
- ۳- لطفا دقت کنید که در **گوشی های مارک ABN**، دو کمان فلزی ذاتاً دارای انحراف کافی برای قرارگیری در گوش هستند، بنابراین از **پیچاندن آن ها خودداری نمایید**. این امر موجب شکستن کمان می شود.
- ۴- در صورتی که کمان ها را برعکس در گوش قرا دهید، صدا فقط از یک گوش شنیده می شود.
- ۵- هرچند وقت یکبار سوراخ های پوار کمان فلزی را تمیز و ضد عفونی نمایید.

