

نحوه انجام PM دستگاه پمپ سرنگ (Agilia)

۷) هنگام روشن شدن دستگاه عملکرد LED ها بررسی شود.

۸) از پنجره Menu میزان شارژ باتری را بررسی می کنیم. در سرعت تزریق 5ml/h ظرفیت باتری می بایست حداقل 10 ساعت باشد.

۱۰) بازو را عقب و جلو برده و از سالم بودن و گیر نداشتن آن اطمینان حاصل می نمایم.

۱۳) گیره نگهدارنده سرنگ را باز می کنیم؛ صدای آلارم و تصویر خطا را روی نمایشگر مشاهده می نمایم.

۱۴) گیره سرانبری را باز کرده؛ صدای آلارم و تصویر خطا را روی نمایشگر مشاهده می نمایم.

۱۵) ابتدا دکمه Bolus را فشار داده و آنرا روی سرعت تزریق 5ml/h قرار می دهیم سپس آنرا نگه داشته تا تزریق سریع انجام شود؛ مشاهده شود که حجم تزریق با حجم انتخابی برابر باشد.

۱۶) دکمه Power و Menu را با هم نگه داشته و از منوی User قسمت Contrast کنتراست صفحه نمایش را بررسی می کنیم.

۱۷) از پنجره Menu قسمت Sound قابل تنظیم است.

۱۸) از پنجره Menu قسمت Date/Time قابل تنظیم است.