



راهنمای سریع کپسول اکسیژن

- 1- کپسول اکسیژن را پس از پر نمودن **حتما در ترالی** قرار دهید. حال مانومتر را به کپسول اکسیژن وصل کنید و در صورت نشستی از واشر استفاده نمایید.
- 2- شیشه ی آب مقطر را تا دوسوم شیشه یا خط نشانه پر نمایید و **حتما پس از پایان کار جهت جلوگیری از انتقال بیماریها شیشه را تخلیه و تمیز کنید.**
- 3- یک سر لوله ی پلاستیکی را به شیشه ی آب مقطر و سر دیگر را به سوند بینی یا ماسک متصل نمایید.
- 4- **برای تست برقراری جریان اکسیژن** پیچ کنترل آن را با توجه به فلومتر در حدود 3 لیتر در دقیقه باز کنید و سپس سر سوند را در لیوان آب قرار دهید. اگر حباب ایجاد شد جریان برقرار است. حال پیچ را ببندید.
- 5- ماسک را روی دهان و بینی فرد گذاشته و بند کشی ماسک را پشت سر ثابت کنید به طوری که از اطراف ماسک اکسیژن خارج نشود. حال پیچ کنترل جریان اکسیژن را باز کنید و طبق دستور پزشک تنظیم نمایید تا جریان برقرار شود.
- 6- پس از اتمام کار پیچ کنترل جریان و شیر اصلی کپسول را ببندید و کپسول را در محل مناسبی قرار دهید. همچنین لوله ی پلاستیکی، سوند و ماسک را دور بریزید.

