



کد ثبت:

تاریخ:

چک لیست اپراتوری دستگاه الکتروشوک ZOLL

اطلاعات دستگاه

نام بخش:

مدل دستگاه:

دوره PM:

شماره سریال:

شماره شناسه / اموال:

تاریخ بازدید:

ردیف	عنوان	قبول	رد	توضیحات
بررسی مشخصات ظاهری دستگاه				
۱	دستگاه تمیز باشد و هیچ شکستگی در بدنه دستگاه دیده نشود.			
۲	اتصال پدالها (هر دو پدال) به بدنه دستگاه مناسب باشد.			
۳	پدالها به راحتی از بدنه دستگاه جدا شود.			
۴	پدالها تمیز باشد و هیچ خراشیدگی، شکستگی و تغییر رنگ در پدالها دیده نشود.			
۵	پدال اطفال به راحتی از پدال بزرگسال جدا شود.			
۶	کلیدها و لامپهای روی پدالها سالم باشد.			
۷	اتصال کابل MFC (کابل چند منظوره) به پدال APEX مناسب باشد.			
۸	کانکتورها و کابلها سالم باشد (عدم وجود خراشیدگی یا اتصالی)			کابل برق
				کابل ECG
				کابل MFC
				کابل پدالها
۹	باتری به درستی نصب شده و شارژ کامل باشد.			
۱۰	ژل الکتروود، چست لید، کاغذ پریتتر، پنبه الکلی، پدهای مصرفی باید کنار دستگاه باشد.			
بررسی عملکرد دستگاه				
۱	دستگاه را در مود مانیتور روشن کنید. پس از ۴ بوق پیاپی باید روشن شود.			
۲	دستگاه را در مود شوک روشن کنید. انرژی را روی ۳۰ ژول تنظیم کرده، شارژ و سپس تخلیه کنید. پیام TEST OK باید روی صفحه نمایش ظاهر شود. (پدالها باید در محل مخصوص خود، روی بدنه دستگاه قرار داشته باشند).			
۳	فعالیت سیگنال صوتی پس از شارژ انرژی شروع و با تخلیه انرژی باید پایان یابد.			
۴	پریتتر دستگاه را چک کنید و از عملکرد درست آن مطمئن شوید.			
۵	دستگاه را در مود پیس روشن کنید. ریت پیس را روی 150 PPM تنظیم کرده و دکمه پریتتر را فشار دهید. در این حالت پالسهای پیس در هر ۲ واحد بزرگ کاغذ یا ۱۰ واحد کوچک کاغذ باید تکرار شوند. (در این حالت کابل MFC باید به پدال APEX وصل باشد).			

عملکرد دستگاه تأیید می گردد.

دستگاه به سرویس و تعمیر نیاز دارد.

امضاء تکمیل کننده فرم

امضاء مسئول بخش