


دستورالعمل استفاده از نبولایزر OMRON

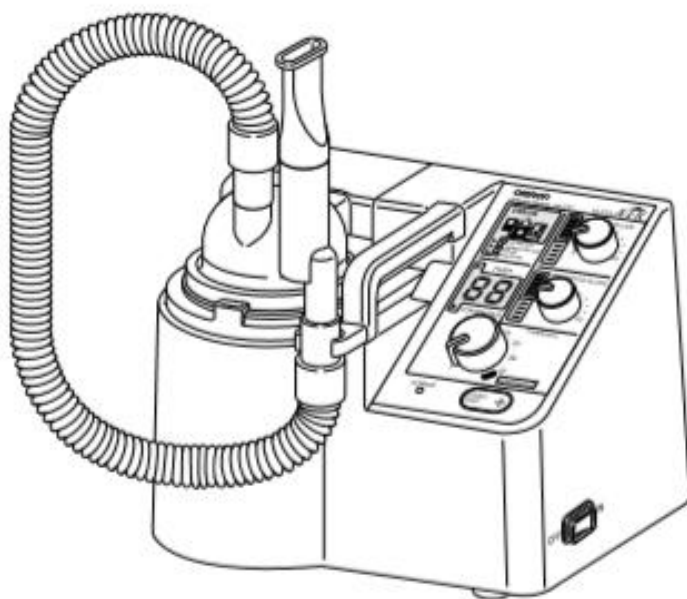

نکات

- میزان آب داخل دستگاه باید تا سطح مشخص شده Water Level باشد
- دمای آب استفاده شده برای نبولایزر باید در حدود $26^{\circ}C$ باشد.
- پس از هر بار استفاده آب داخل مخزن را عوض کنید.
- چنانچه از دستگاه در حالت مداوم Continuous استفاده می شود، بهتر است هر ۲۴ ساعت یکبار آب درون مخزن تعویض شود
- برای جلوگیری از انسداد در سیم لوله و عملکرد بهتر دستگاه ' باید آنرا هم سطح با بدن بیمار قرار دهیم.

روش استفاده از دستگاه

- ۱- دستگاه را به برق زده دکمه ON/OFF در گوشه سمت راست دستگاه قرار دارد. دکمه را در حالت ON قرار می دهیم با اینکار فن دستگاه روشن می شود.
- ۲- زمان را به میزانی که می خواهیم (واحد دقیقه) تنظیم می کنیم.
- ۳- میزان جریان هوا و حجم نبولایزر نیز قابل تنظیم می باشد.
- ۴- در این مرحله برای بکار انداختن دستگاه دکمه START را فشار می دهیم ' دستگاه براساس زمان تنظیم شده شروع بکار می کند تا اینکه تایمر عدد صفر را نمایش دهد. در این زمان ' کار دستگاه به اتمام رسیده با فشردن دکمه STOP آنرا غیرفعال می کنیم.

نکته : دکمه تایمر دستگاه به گونه ای است که برای فاصله بین اعداد ۱ تا ۵ دقت درجه ها ۱ واحد می باشد. اما از عدد ۱۵ تا ۳۰ دقت درجه ها ۲ واحد می باشد.