


- ۱- کلید روشن و خاموش (On/Off)
- ۲- کلید تغییر مُد رکورد (مُد های Manual، Auto و Rhythm)
- ۳- در صورت خارج شدن سیگنالها از صفحه نمایش از کلید Reset استفاده کنید.
- ۴- گین های قابل انتخاب Auto ، 20mm/mv ، 5 ، 10 ، 25 (Sense) می باشد. (بهترین حالت ۱۰ می باشد)
- ۵- سرعت های قابل انتخاب برای انجام رکوردگیری 25 ، 5/12 ، 6/25 و 50mm/s (Speed) می باشد. (بهترین حالت 25mm/s می باشد)
- ۶- منوی تنظیمات دستگاه (Menu)
- ۷- کلید تایید در منو تنظیمات (Enter)
- ۸- کلیدهای حرکت در منو (به سمت چپ و راست و بالا و پایین)
- ۹- شروع و پایان گرفتن نوار (Start/Stop)
- ۱۰- نمایشگر باتری (در صورت سبز بودن، شارژ کامل و در صورت نارنجی بودن باید شارژ گردد). زمان شارژ کامل ۳ ساعت می باشد.
- ۱۱- جلو بردن لیدهای انتخابی در مُد Manual
- ۱۲- عقب بردن لیدهای انتخابی در مُد Manual
- ۱۳- کپی گرفتن از آخرین رکورد اتوماتیک گرفته شده.
- ۱۴- جهت افزایش عمر باتری و عملکرد صحیح دستگاه بعد از سبز شدن چراغ باتری، دستگاه را از شارژ خارج نمایید.

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و پل میرداماد، برج نگین، طبقه ششم، واحد ۶۰۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۶۷۹ تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۵۰۷ ۰۲۱-۸۸۷۷۲۰۴۴-۸۸۷۷۲۰۱۲

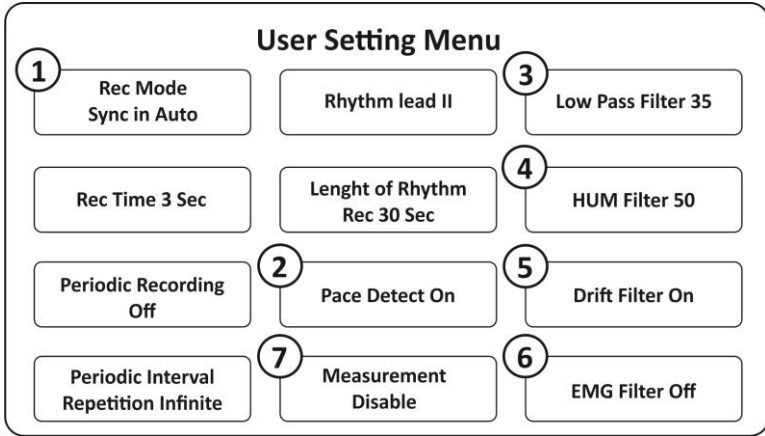

توجه: جهت داشتن ECG مطلوب، تنظیمات منوی User Setting با تصویر بالا مطابقت داشته باشد.

توصیه های مهم:

- ۱- به صورت روزانه سلامت ظاهری اکسوسوری ها را چک کنید.
- ۲- به هیچ وجه از الکترودهای سولفات شده استفاده نکنید.
- ۳- مسیر کابل ECG را از کابل برق جدا کنید.
- ۴- از اعمال فشار، کشش یا هر گونه نیروی مکانیکی به کابل پرهیز کنید.
- ۵- در صورت عدم وجود ارت مناسب در مرکز درمانی خود، کابل برق را از سیستم جدا کرده و از باتری استفاده کنید.
- ۶- از تمیز بودن پوست بیمار اطمینان حاصل کنید.
- ۷- عصبی و مضطرب بودن بیمار تاثیر منفی در نتیجه کار خواهد داشت.
- ۸- الکترودها را روی بخش استخوانی بدن قرار ندهید.
- ۹- از ژل به میزان کافی استفاده کنید.
- ۱۰- در صورت وجود نویز علی رغم به کارگیری کلیه توصیه های فوق، از فیلترهای دستگاه استفاده کنید. (شماره ۳ و ۴ و ۶)
- ۱۱- از فیلتر Drift برای حذف نوسانات خط مرجع سیگنال استفاده کنید. (شماره ۵)
- ۱۲- برای حذف نویزهای فرکانس بالا و ماهیچه ای از فیلتر EMG filter استفاده کنید. (شماره ۶)
- ۱۳- برای اندازه گیری پارامترهای ECG قابلیت اندازه گیری را فعال نمایید. (شماره ۷)
- ۱۴- برای رکوردگیری مطلوب و تمیز نگه داشتن هد پرینتر از کاغذ مرغوب استفاده نمایید.
- ۱۵- استفاده از فیلترهای 25Hz و EMG به صورت همزمان، ممکن است منجر به تغییر در دامنه امواج سیگنال ECG گردد.
- ۱۶- همچنین استفاده از فیلترهای Drift و EMG به صورت همزمان، ممکن است منجر به تغییر در محل مارکر Pace گردد.

در صورت بروز هر گونه مشکل قبل از ارسال دستگاه برای تعمیر با واحد خدمات پس از فروش هماهنگ نمایید.

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، بین چهارراه جهان کودک و پل میرداماد، برج نگین، طبقه ششم، واحد ۶۰۷

فکس: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۶۷۹ تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۰۵۰۷-۱۲-۸۸۷۷۲۰۴۴-۸۸۷۷۲۰۲۱