


راهنمای کاربری سریع پالس اکسی متر Nellcor مدل ۱۹۰ NPB

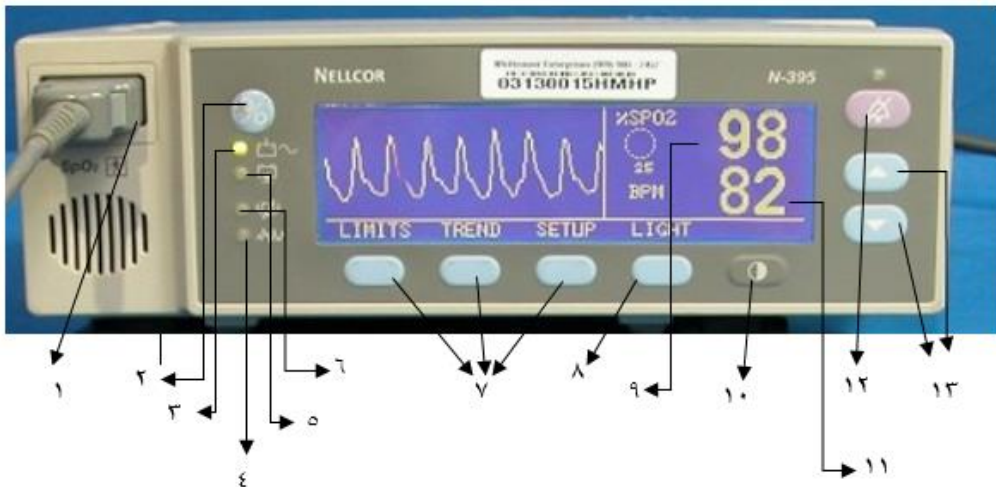

کلید روشن/ خاموش	۲	محل اتصال پروب	۱
نشانگر حرکتی	۴	نشانگر اتصال برق شهری	۳
نشانگر جستجوی پالس	۶	نشانگر ضعیف بودن باتری	۵
تنظیم نور صفحه نمایش	۸	کلیدهای کنترل	۷
تنظیم کنتراست صفحه نمایش	۱۰	نشانگر SPO ₂	۹
کلید بی صدا کردن آلارم	۱۲	نشانگر نرخ ضربان قلب	۱۱
		کلید تنظیم بالا و پایین	۱۳

نحوه استفاده:

- ۱- دستگاه را مجاور بیمار قرار دهید.
- ۲- کابل دستگاه را به برق شهری وصل کنید (در صورت خراب بودن باتری، دستگاه با برق شهری نیز کار نمی‌کند (۴EEE))
- ۳- پروب مناسب با بیمار را به دستگاه وصل کنید.
- ۴- پروب را به انگشت بیمار وصل کنید.

تنظیم دستگاه:

- ✓ برای تنظیم حد بالا و پایین آلارم‌ها از کلید "LIMITS" سپس کلیدهای بالا و پایین استفاده کنید.
- ✓ برای تغییر نوع نمایش شکل موج به روش زیر عمل کنید:

Setup → View → Pleth/BLIP

- ✓ برای تنظیم شدت صدای ریتم قلب، کلید تنظیم بالا یا پایین را نگه دارید.
- ✓ برای مشاهده شدت صدای اخطار دستگاه کلید ۱۲ را نگه داشته، سپس با کلید بالا و پایین آن را تنظیم کنید.