



- 1- قسمت نمایش آلارم های فنی
- 2- نشانگر وضعیت صدای دستگاه (توقف آلارم ها با علامت و قطع کلیه صداها با علامت مشخص می شود.)
- 3- قسمت نمایش آلارم های فیزیولوژیک
- 4- LED نمایشگر آلارم
- 5- کادر مربوط به پارامتر های ECG (در این کادر مقدار HR و برخی از تنظیمات صورت گرفته نمایش داده می شود)
- 6- کادر NIBP (در این قسمت مقادیر فشار اندازه گیری شده در قالب سه عدد MEAN ، SYS و DIA نمایش داده می شوند)
- 7- کادر SPO2 (درصد اشباع اکسیژن خون در این کادر قابل رویت است)
- 8- کادر IBP(1,2) (در این کادر مقادیر فشار خون اندازه گیری شده به روش تهاجمی از هر دو کانال IBP در قالب 3 عدد MEAN ، SYS و DIA قابل رویت است.)
- 9- نرخ تنفس در دقیقه
- 10- مقادیر دمای اندازه گیری شده توسط دو سنسور T1 و T2 و همچنین اختلاف دمای آن ها در این کادر نمایش داده می شود.
- 11- نشانگر وضعیت STANDBY
- 12- کلید منو (با فشار دادن این دکمه ، کادر منوی اصلی ظاهر می شود)
- 13- کلید اندازه گیری فشار (برای اندازه گیری فشار از طریق کاف ، کافی است این دکمه را فشار دهید.)
- 14- کلید رکورد (برای فعال کردن رکورد دستگاه از این کلید استفاده کنید)
- 15- کلید خروج از منو (در هریک از منو ها ، با فشار دادن این کلید ، به صفحه اصلی باز می گردد.)
- 16- کلید FREEZE (با فشار دادن این کلید ، کلیه شکل موج ها ثابت می شوند و برای خارج شدن از این حالت ، کلید را مجدداً فشار دهید)
- 17- کلید سکوت (در صورتی که یک بار این کلید را فشار دهید ، کلیه آلارم ها برای مدت مشخصی متوقف می شوند و علامت در کادر بالای صفحه ظاهر می گردد. در صورت که این کلید را به مدت 2 ثانیه فشار دهید ، کلیه صداها دستگاه قطع می گردند و علامت بالای صفحه ظاهر می شود)
- 18- ناب کنترلی دستگاه
- 19- دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه
- 20- LED باطری (در صورتی که دستگاه تنها با باطری کار کند ، این LED چشمک زن می شود.)
- 21- LED برق شهر (در صورت وصل بودن دستگاه به برق شهر ، این LED روشن می شود.)
- 22- LED نشانگر روشن بودن سیستم
- 23- نشانگر اتصال مانیتور به سانترال
- 24- نشانگر میزان شارژ باطری
- 25- شکل موج RESP
- 26- شکل موج IBP کانال 2
- 27- شکل موج IBP کانال 1
- 28- شکل موج نبض که از طریق پروب SPO2 اندازه گیری می شود.
- 29- شکل موج ECG کانال 2
- 30- شکل موج ECG کانال 1
- 31- در این قسمت می توانید لید ECG را انتخاب کنید.
- 32- در این قسمت می توانید گین شکل موج را تغییر دهید.
- 33- در این قسمت نوع فیلتر ECG را می توانید انتخاب کنید.
- 34- نشانگر وضعیت بیمار از نظر سن و شماره تخت