


راهنمای استفاده از دستگاه پالس اکسی متر Novamatrix

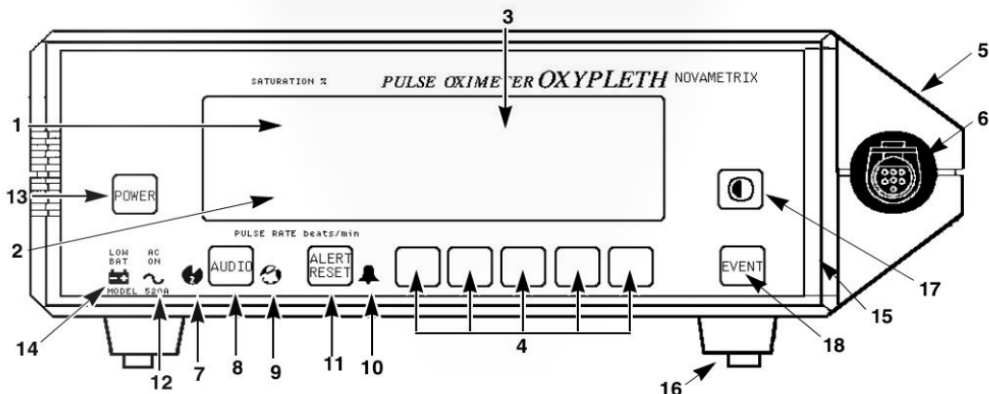

مشخصات نمای جلوی پالس اکسی متر :

- ۱- محل نمایش درصد اشباع
- ۲- محل نمایش Pulse Rate
- ۳- LCD: محل نمایش شکل موج و TREND و منوهای دکمه های نرم افزاری
- ۴- کلید های نرم افزاری که با تغییر منو ، عملکردهای آنها تغییر می یابد
- ۵- دستگیره حمل دستگاه
- ۶- محل اتصال کانکتور $SP0_2$ به دستگاه
- ۷- قطع آلارم صوتی به مدت دو دقیقه
- ۸- یکبار فشار دکمه: قطع آلارم صوتی به مدت دو دقیقه ، دوبار فشار دکمه: وصل مجدد آلارم
- ۹- Audio Off: نمایش چشمک زن آلارم
- ۱۰- نشاندهنده آلارم : موقع آلارم ، نشاندهنده به رنگ قرمز چشمک می زند
- ۱۱- غیر فعال کردن نشان دهنده آلارم
- ۱۲- AC/ON: نمایش استفاده از برق شهر با چراغ سبز
- ۱۳- دکمه Power : روشن کردن مانیتور دستگاه
- ۱۴- نشان دهنده وضعیت باتری (قرمز: استفاده از باتری ، چشمک زن: کاهش ولتاژ باتری)
- ۱۵- ستون قرمز آلارم : با شروع آلارم وتا خاتمه آن چراغ چشمک زن مرتبا چشمک می زند
- ۱۶- پایه مانیتور
- ۱۷- کنتراست : تنظیم روشنایی صفحه تصویر مانیتور
- ۱۸- می توان وقایع رخ داده در روی Display را برای بررسی (Trend) علامت گذاری نمود