

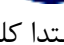

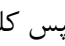
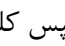
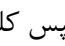




راهنمایی های عمومی :

- ۱ - دستگاه را در محل مناسب قرارد دهید از قراردادن دستگاه در مجاورت دستگاههای حرارتی و برودتی، محل های پرسر و صدا ، پنجره و نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید .
- ۲ - برای تمیز کردن کناره های شیشه ای تخت احیاء از مواد الکل دار استفاده ننمایید برای این کار از سایر مواد ضد عفونی کننده رقیق شده مانند : هایژن، دکونکس و... استفاده ننمایید . برای نظافت قسمتهای فلزی دستگاه محدودیتی وجود ندارد .
- ۳ - حداقل ۳۰ دقیقه قبل از قراردادن نوزاد در دستگاه، دستگاه را روشن کنید و اجازه دهید دستگاه در این مدت در مد Pre Warm کار کند تا دستگاه به شرایط ثبات حرارتی برسد و دقیقاً همان دمای مورد نظر شما را تامین نماید .
- ۴ - تا حد ممکن از خارج کردن سنسور SKIN خودداری نمایید و برای وصل کردن مجدد سنسور، با توجه به علامت روی سنسور، آن را با دقت و به آرامی در محل مربوطه وارد نمایید.
- ۵ - سنسور پوستی را همیشه روی قسمت کبد و سینه نوزاد قرار دهید و مراقب باشید که هیچ گاه از بدن نوزاد جدا نشود . پرسنل بخش باید هر ۳۰ دقیقه یکبار وضعیت نوزاد و دمای بدن آن را بررسی کنند .
- ۷- در صورت وجود هر گونه خرابی در دستگاه، تا زمان برطرف شدن مشکل از دستگاه استفاده نکنید .

راهنمای استفاده از دستگاه :

- ۱ - کلید Power (پشت دستگاه)، دستگاه را روشن کنید. سپس می توانید با کلیدهای روی دستگاه به دلخواه هر کدام از قسمتهای کنترل کننده دما، لامپ خونگیری و لامپ های فتوترایی را روشن کنید .
- ۲ - در این مدل تخت احیاء می توانید به سه صورت دمای تخت (بدن نوزاد) را کنترل کنید :
- ۱- حالت گرم کردن اولیه (Pre – warm) ۲- استفاده از سنسور پوستی (Baby) ۳- کنترل دستی (Manual)
- ۳ - با انجام دادن هر کدام از مراحل ۴ تا ۵ می توان دمای تخت را تنظیم کرد .
- ۴ - برای تنظیم دما در حالت سنسور پوستی ابتدا کلید  فشار دهید . نمایشگر دمای تنظیمی به حالت چشمک زن در می آید. با استفاده از کلیدهای  و  دمای مورد نظر را تنظیم و دوباره کلید  را فشار دهید .
- ۵ - برای تنظیم دما در حالت دستی ابتدا کلید  و سپس کلید  فشار دهید و بعد دوباره کلید  فشار دهید . در این حالت با استفاده از کلیدهای  و  می توانید قدرت هیتر را از 0 تا 50 درصد تنظیم کنید. قدرت هیتر را می توانید در نمایشگر مخصوص آن مشاهده کنید . در این حالت دستگاه هر ۱۵ دقیقه یکبار آلارم می زند تا پرسنل برای بررسی وضعیت نوزاد و دمای بدنش بالای تخت حضور یابند .
- ۶ - در صورت نیاز برای تغییر زاویه هد (قسمت وارمر) دستگاه، مثلاً برای انجام رادیولوژی از نوزاد، ضامن قرمز رنگ پشت دستگاه را به سمت پایین بکشید. هد بالای دستگاه می تواند به دو طرف حرکت و در زاویه های 30° و 60° قرار بگیرد .
- ۷ - برای زاویه دادن به تخت با استفاده از دسته زیر تخت می توانید، تخت را تا 10° درجه زاویه دهید .

(پیامهای خطای دستگاه)

روشن شدن LED	علت آلارم
POWER	سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه دچار مشکل شده است
SENSOR	یکی از دو سنسور پوستی یا تخت از جای خود خارج شده است یا آسیب دیده است
OVERHEAT	سنسور پوستی دمای بالاتر از 38°
DEVIATION	وجود اختلاف بین دمای واقعی و دمای تنظیم شده به میزان