











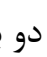
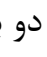



## کاربری سریع دستگاه ۷-Radical

<p>به منظور خاموش / روشن کردن دستگاه، دکمه  را فشار دهید.          (برای خاموش شدن دستگاه، این دکمه را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.)</p>	<p>خاموش / روشن</p>
<p>به منظور قطع آلام دستگاه، دکمه  را فشار دهید.</p>	<p>قطع آلام</p>
<p>به منظور تغییر پارامترهای Trend و Graph، دکمه  را فشار دهید.</p>	<p>تغییر پارامترهای Trend و Graph</p>
<p>به منظور افزایش صدا دکمه  و کاهش صدا دکمه  را فشار دهید.</p>	<p>تنظیم صدای بوق دستگاه</p>
<p>به منظور تنظیم میزان روشنایی تصویر، دکمه  را فشار دهید.</p>	<p>تنظیم روشنایی</p>
<p>ابتدا دکمه  یا  فشار دهید، سپس به منظور انتخاب آلام ها  را فشار دهید و بعد به منظور تغییر آیتم های منو،  و  فشار دهید و برای انتخاب آن دکمه  را فشار دهید، سپس با استفاده از  و  آن را تغییر داده و با فشار دادن <input checked="" type="checkbox"/> آن را ذخیره و یا با دو بار فشار دادن <input type="checkbox"/> به صفحه ی اصلی باز گردید.</p>	<p>تنظیم محدودیت آلام ها</p>
<p>به منظور تغییر میزان حساسیت دستگاه به مُد های MAX، APOD و Normal دکمه  را فشار دهید.</p>	<p>تنظیم حساسیت دستگاه</p>
<p>APOD - پیشنهاد می گردد با این مُد سیگنال گیری آغاز گردد. (مناسب برای مواقعی که احتمال جدا شدن دستگاه وجود دارد.)</p>	
<p>Normal - در این حالت نشانگری نمایش داده نمی شود و زمانی که بیمار تحت نظر می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. (مناسب برای مواقعی که در مُد APOD، خطای "low perfusion" یا "low signal IQ" ظاهر شود.)</p>	
<p>Max - مناسب برای بیماران با سیگنال بسیار ضعیف و مناسب برای مواقعی که در مُد Normal، خطای "low perfusion" یا "low signal IQ" ظاهر شود.</p>	