


دستورالعمل کاربری دستگاه الکتروکاردیوگراف C120

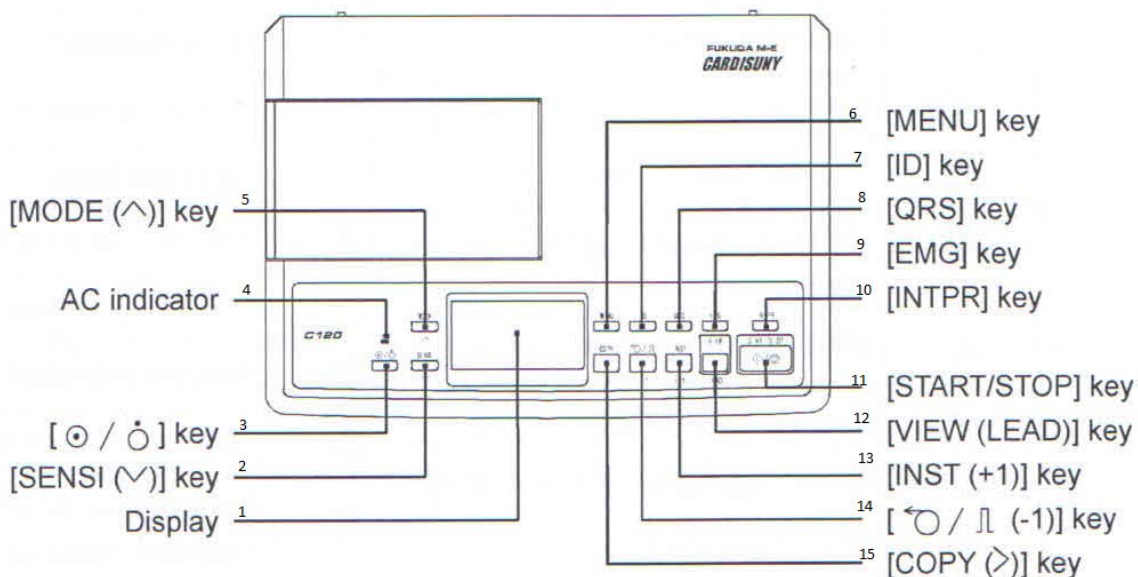

1. **display**: نمایشگر
2. **SENSI**: - تنظیم حساسیت دستگاه
- حرکت مکان نما به سمت پایین در منوی تنظیمات
3. **کلید عمیاتی**: روشن و خاموش کردن دستگاه
4. **نشانگر AC**: هنگام کار با برق شهر روشن می شود.
5. **MODE**: - انتخاب مود دستگاه
- حرکت مکان نما به سمت بالا در منوی تنظیمات
6. **MENU**: جهت ورود به منوی دستگاه
7. **ID**: ورود به صفحه شماره ID وارد شده
8. **QRS**: تنظیم حساسیت تشخیص موج QRS
9. **EMG**: تنظیم حساسیت فیلتر EMG
10. **INTRP**: انتخاب داده های آنالیز الکتروکاردیوگراف
11. **START/STOP**: شروع و پایان ثبت
12. **VIEW(LEAD)**: - ورود به صفحه نمایش
- تغییر لید در حالت مشاهده
13. **INST(+1)**: - ورود به مود INST



- تغییر در منوی تنظیمات یا صفحه شماره ID وارد شده

- یک واحد افزایش مقدار در موقعیت مکان نما

14. **COPY(>):** - کپی کردن آریتمی های ثبت شده و یا شکل موج های ثبت شده

- حرکت دادن نشانگر به سمت راست در منوی تنظیمات

15. **SENSI (v):** - انتخاب موج مورد نظر و نمایش حساسیت دستگاه

- حرکت دادن نشانگر به سمت پایین در منوی اصلی

نحوه کاربری:

- ابتدا با استفاده از دکمه on/off دستگاه را روشن کنید.

- کابل بیمار را به کانکتور مربوط به آن (جنب دستگاه) متصل نمایید.

- گزینه Mode را انتخاب کنید. مود های مورد نظر خود را انتخاب کنید.

- دکمه START را بفشارید تا دستگاه شروع به کار کند.

- در صورت بروز مشکل یا گیر کردن کاغذ پرینتر از کلید STOP استفاده کنید. در حالت manual برای متوقف کردن recording می بایست

کلید INST را بفشارید.