



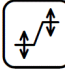

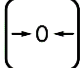


دستورالعمل کار با دستگاه بیهوشی Fabius CE

- ۱- برای روشن و خاموش کردن دستگاه از کلید ON/OFF پشت دستگاه استفاده می کنیم که بعد از انجام Self test دستگاه در حالت Standby قرار می گیرد و چراغ کلید روشن می شود.
- ۲- برای حالت تنفس دستی و خود بخودی مریض کلید Man /Spont را فشار می دهیم و Apl Valve را روی حالت Man و فشار مورد نظر قرار می دهیم و Fresh Gas را به میزان مورد نظر باز می کنیم .
- ۳- برای رفتن به حالت IPPV بایستی کلید IPPV را فشار دهیم و مقادیر مورد نظر Pmax و VT و سایر پارامترها را تنظیم می کنیم و Valve APL را روی حالت IPPV قرار می دهیم و شیرهای Fresh Gas را به میزان مورد نظر باز می کنیم
- ۴- برای تنظیم حد بالا و پائین آلارم های دستگاه با فشار دادن کلید  و با انتخاب پارامتر مورد نظر با استفاده از Rotary Knob مقدار حد بالا و پائین الارم را تنظیم می کنیم
- ۵- برای کالیبره کردن سنسور اکسیژن و Flow sensor کلید  را فشار می دهیم حال برای کالیبره کردن O2 Sensor روی گزینه 21% O2 می رویم و سنسور اکسیژن را بیرون می آوریم و به مدت ۲ دقیقه در هوای محیط قرار می دهیم و بعد از ۲ دقیقه گزینه مورد نظر را انتخاب می کنیم که در صورت کالیبره شدن O2 Sensor يك نشان ✓ و در صورت کالیبره نشدن نشان x داده می شود .
- ۶- برای کالیبره کردن Flow Sensor روی گزینه Flow Sensor می رویم و شلنگ بازدمی را در می آوریم و کلیه شیرهای Fresh Gas را می بندیم و روی گزینه مورد نظر کلیک می کنیم که در صورت کالیبره شدن نشان ✓ و در صورت کالیبره نشدن نشان نمایش داده می شود .
- ۷- برای بازگشت به صفحه اصلی کلید  را فشار می دهیم .
- ۸- برای نمایش صفحه های دیگر نمایشگر کلید  را فشار می دهیم .
- ۹- برای قطع صدای آلارم به مدت ۲ دقیقه کلید  را فشار می دهیم .