



<p>۲- زمان سنج طول عمر لامپ: طول عمر لامپ ها ۲۵۰۰ ساعت می باشد و پس از گذشت این مدت زمان، به تدریج ضعیف می شوند.</p>	<p>۱- دکمه شروع به کار دستگاه START</p>
<p>۴- زمان سنج نور درمانی: هنگام شروع نور درمانی دکمه RESET را فشار دهید، ارقام زمان سنج مدت نور درمانی را به ساعت نشان می دهد.</p>	<p>۳- دما سنج اتوماتیک</p>

روش کار:

- ۱- دستگاه را به برق شهر وصل کرده کلید ۱ (START) را فشار دهید تا ۸ عدد لامپ دستگاه روشن شود.
- ۲- نوزاد را روی توری مخصوص نگهدارنده قرار داده و به کمک کلید RESET زمان نور درمانی را تنظیم نمایید.

