


راهنمای مختصر کاربری

New FC1400

مراحل راه اندازی:

به مدت دو ثانیه کلید روشن کردن دستگاه که بر روی دستگاه می باشد را فشار دهید تا دستگاه روشن گردد سپس پروب ها را وصل کرده و دکمه $\rightarrow 0 \leftarrow$ را جهت صفر کردن انقباضات رحمی فشار می دهیم. جهت شروع پرینت وضعیت بیمار دکمه $\frac{M}{P}$ را فشار می دهیم. دستگاه شروع به ثبت و پرینت اطلاعات بالینی بر روی کاغذ می نماید.

صفحه کلید:

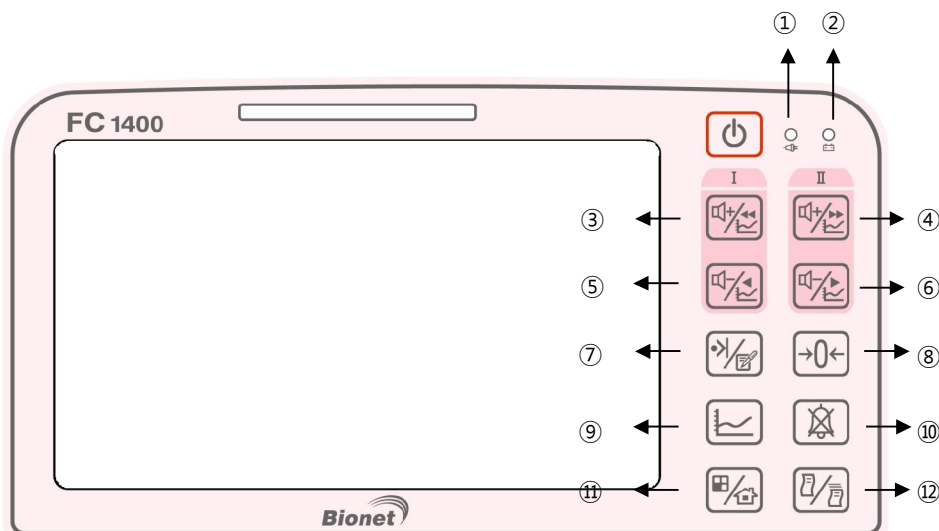

- 1- نمایشگر برق شهر: نمایش دهنده وصل بودن برق شهر می باشد.
- 2- نمایشگر باتری: نمایش دهنده وصل بودن باتری
- 3- زیاد کردن صدای پروب اول US1
کلید میانبر: با استفاده از این کلید در هنگامی که در حافظه قرار داریم می توانیم 6 ثانیه به 6 ثانیه به عقب برگردیم.
- 4- زیاد کردن صدای پروب دوم US2
کلید میانبر: با استفاده از این کلید در هنگامی که در حافظه قرار داریم می توانیم 6 ثانیه به 6 ثانیه به جلو برگردیم.
- 5- کم کردن صدای پروب اول US1
کلید میانبر: با استفاده از این کلید در هنگامی که در حافظه دستگاه قرار داریم می توانیم 1 دقیقه به 1 دقیقه در آن به عقب برگردیم.
- 6- کم کردن صدای پروب دوم US2
کلید میانبر: با استفاده از این کلید در هنگامی که در حافظه دستگاه قرار داریم می توانیم 1 دقیقه به 1 دقیقه در آن به عقب برگردیم.
- 7- مارکر پرستار
- 8- صفر کردن مقدار انقباضات رحمی
زمانی که پروب TOCO را به مریض وصل میکنیم توسط این کلید ابتدا مقدار آن را صفر کرده و سپس از دستگاه استفاده می کنیم.
- 9- حافظه دستگاه.
- 10- قطع آلارم
- 11- تغییر حالت نمایش در صفحه نمایش
- 12- دکمه شروع و یا پایان پرینت: با زدن این دکمه پرینتر به اندازه زمانی که برای آن مشخص شده شروع به کار میکند و بعد از زمان مشخص شده قطع می گردد.