



راهنمای کاربری سریع پمپ سرنگ Medima

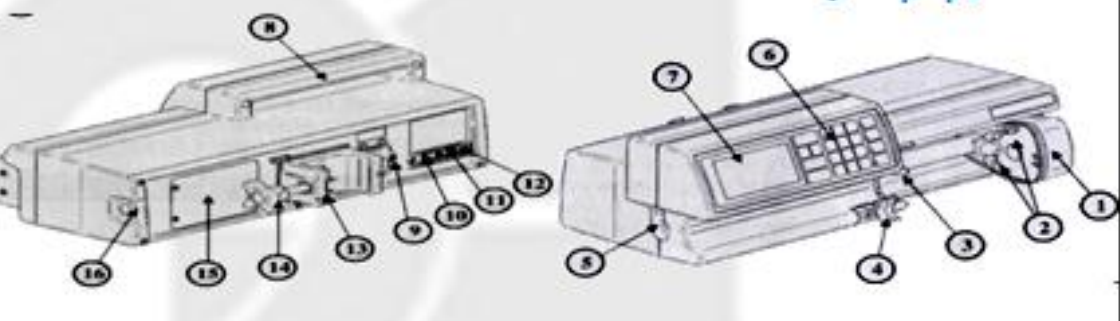



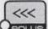



- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ۱. بازوی انتهایی پمپ | ۲. نگهدارنده پیستون | ۳. گیره لبه های سرنگ |
| ۴. گیره سرنگ | ۵. قلاب لوله متصل به بیمار | ۶. صفحه کلید |
| ۷. صفحه نمایش | ۸. دستگیره برای حمل و نقل | ۹. ورودی اصلی برق |
| ۱۰. ورودی اتصال ۱۲ ولت | ۱۱. ورودی RS۳۲C | ۱۲. ورودی اتصال به سیستم |
| ۱۱. ورودی RS۳۲C | ۱۳. گیره پایه | ۱۴. پیچ گردان |
| ۱۵. درپوش باتری | ۱۶. دکمه برای خارج کردن DOKING | |

نحوه آماده سازی و راه اندازی:

در ابتدا پیام (CONTINUE) ممکن است بر روی صفحه ظاهر شود. می توانید با استفاده از دکمه NO تمامی اطلاعات در مورد تزریق قبل را پاک کنید و اجازه تنظیم مقادیر برای تزریق را پیدا کنید. با فشار دکمه YES پمپ این اجازه را به شما می دهد تا تزریق قبلی را ادامه دهید.

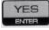۱. دکمه  بر روی پنل دستگاه را فشار داده تا دستگاه روشن شود.

۲. سرعت تزریق بر حسب ml/h را توسط صفحه کلید اعداد وارد و کلید  را فشار دهید.
- کلید NO پاک کردن مقادیر)
۳. در صورت نیاز مقدار حجم تزریق را بر حسب ml وارد و کلید  را فشار دهید. (کلید NO پاک کردن مقادیر)
۴. با زدن کلید  به صورت پیوسته مقادیر مربوطه را تایید تا از منوی تنظیمات خارج شوید.
۵. سرنگ را در جای مربوطه قرار داده (سایزو نوع سرنگ مشخص شده در پایین صفحه LCD با سایز سرنگ مورد استفاده یکسان باشد).
- با استفاده از  the type of syringe را انتخاب کنید و سپس NO را فشار دهید، لیستی از سرنگها ظاهر می شوند. سرنگ مورد نظر را انتخاب کرده و آنرا تایید کنید.
۶. کلید  را فشار دهید تا دستگاه به صورت اتوماتیک سرنگ را بارگیری کند.
۷. در صورت اعمال صحیح موارد ذکر شده در بالا، عبارت READY بر روی صفحه نمایشگر مشخص می شود.
۸. سوزن را به داخل بدن بیمار وارد نمایید و مطمئن شوید در مسیر تزریق حباب وجود ندارد.
۹. در صورتی که از نصب درست سرنگ، تشخیص نوع و سایز سرنگ دستگاه اطمینان حاصل نمودید دکمه  را فشار دهید.

نگهداشت:

- ✱ برای افزایش طول عمر باتری، توصیه می شود که حداقل هر یک هفته یک بار دستگاه با باتری کار کند تا جایی که باتری کاملا دشارژ شده و سیستم خاموش شود و بعد از آن دوباره سیستم را شارژ کنید.
- ✱ برای نظافت دستگاه از پارچه ی نرم و نم دار یا الکل ۷۰% استفاده شود و سپس به وسیله یک پارچه ی خشک شود.

نکات ایمنی:

- ✱ قبل از تمیز کردن دستگاه حتما آن را از برق جدا کنید و تا خشک شدن آن را به برق وصل نکنید.