



کد ثبت:

تاریخ:

چک لیست اپراتوری دستگاه الکتروکاردیوگراف FUKUDA M-E

اطلاعات دستگاه

نام بخش: مدل دستگاه: C 120 دوره PM :
شماره سریال: شماره شناسه / اموال: تاریخ بازدید:

توضیحات	رد	قبول	عنوان
بررسی مشخصات ظاهری دستگاه			
			۱ وجود کاور / پوشش مخصوص دستگاه در زمان عدم استفاده از آن
			۲ تمیزبودن دستگاه
			۳ عدم وجود شکستگی / تغییر شکل
			۴ عدم وجود شوک الکتریکی در زمان لمس بدنه
			۱ عدم وجود آلودگی، خراشیدگی، قطعی یا اتصالی
			۲ کابل برق
			۱ کابل بیمار
			۲ عدم وجود شکستگی سرهای سوزنی / گیره‌های کابل بیمار
			۱ تمیزبودن (عدم وجود زل خشک شده روی آن)
			۲ عدم وجود شکستگی روی دستبندها
			۳ عدم وجود پارگی روی پوارها
			۱ تمیزبودن غلتک رکوردر
			۲ نحوه قرار گیری کاغذ در پرینتر
			۳ عدم قرار گیری سایر کاغذهای پرینتر در محیط گرم
بررسی عملکرد دستگاه			
			عدم قرار گیری دستگاه در زیر نور مستقیم خورشید
			عدم وجود دستگاه‌های با میدان الکتریکی یا مغناطیسی شدید (از قبیل: CT و MRI) در کنار دستگاه
			۱ وضوح و روشنایی مناسب
			۲ نمایش شکل موج‌ها و سایر پارامترها
			۱ نوع چاپ (A)
			۲ فیلتر HUM Drift (ON)
			۳ نوع فیلتر عضلانی (MS) (در صورت وجود پارازیت زیاد)



کد ثبت:

تاریخ:

			۱	سالم بودن چراغ نشان دهنده برق شهر	باتری
			۲	عملکرد صحیح باتری (کارکرد حدود یک ساعت)	
			۳	شارژ کامل باتری (حدود سه ساعت با اتصال به برق شهر)	
			۱	خروج صحیح کاغذ	رکورد
			۲	نمایش صحیح نمودار و زمان (تاریخ و ساعت) دستگاه بر روی کاغذ	

عملکرد دستگاه تأیید می گردد.

دستگاه به سرویس و تعمیر نیاز دارد.

امضاء مسئول بخش

امضاء تکمیل کننده فرم