



کد ثبت:

تاریخ:

## فرم نگهداری پیشگیرانه دستگاه الکتروکاردیوگراف FUKUDA M-E

واحد مهندسی پزشکی

### اطلاعات دستگاه

نام بخش: مدل دستگاه: C 120 دوره PM: شماره سریال: شماره شناسه / اموال: تاریخ بازدید:

توضیحات	رد	قبول	عنوان
<b>بررسی مشخصات ظاهری دستگاه</b>			
			۱ وجود کاور/ پوشش مخصوص دستگاه در زمان عدم استفاده از آن
			۲ تمیزبودن دستگاه
			۳ عدم وجود شکستگی / تغییر شکل
			۴ عدم وجود شوک الکتریکی در زمان لمس بدنه
			۱ عدم وجود آلودگی، خراشیدگی، قطعی یا اتصالی
		۱ کابل برق	کابل
		۲ کابل بیمار	
			۲ ارت دار بودن کابل برق
			۳ عدم وجود شکستگی سرهای سوزنی/ گیره‌های کابل بیمار
			۱ تمیزبودن (عدم وجود زل خشک شده روی آن)
			۲ عدم وجود شکستگی روی دستبندها
			۳ عدم وجود پارگی روی پوارها
			۱ تمیزبودن غلتک رکوردر
			۲ نحوه قرار گیری کاغذ در پرینتر
			۳ وجود کاغذ پرینتر مناسب با رکوردر
			۴ عدم قرار گیری سایر کاغذهای پرینتر در محیط گرم
<b>بررسی عملکرد دستگاه</b>			
			عدم قرار گیری دستگاه در زیر نور مستقیم خورشید
			عدم وجود دستگاه‌های با میدان الکتریکی یا مغناطیسی شدید (از قبیل: CT و MRI) در کنار دستگاه
			۱ وضوح و روشنایی مناسب
			۲ نمایش شکل موج‌ها و سایر پارامترها
			صفحه نمایش



کد ثبت:

تاریخ:

			کلید SENS (AUTO)	۱	تنظیمات
			نوع چاپ (A)	۲	
			فیلتر HUM Drift (ON)	۳	
			نوع فیلتر عضلانی (MS): (وجود پارازیت زیاد)	۴	
			فرکانس فیلتر عضلانی (40 HZ)	۵	
			طول رسم کاغذ/ نمودار (M1)	۶	
			سرعت رسم کاغذ/ نمودار (25 mm/s)	۷	
			فرکانس برق شهر (Line Freq.) (50 HZ)	۸	
			زمان نمونه برداری (4S)	۹	
			نوع رسم منحنی (Cont)	۱۰	
			تاریخ و ساعت دستگاه	۱۱	
			Battery Save (ON)	۱۲	
			Base Line (3 dots)	۱۳	
			Channel (3ch)	۱۴	
			سالم بودن چراغ نشان دهنده برق شهر	۱	باتری
			عملکرد صحیح باتری (کارکرد حدود یک ساعت)	۲	
			شارژ کامل باتری (حدود سه ساعت با اتصال به برق شهر)	۳	
			خروج صحیح کاغذ	۱	رکورد
			نمایش صحیح نمودار و زمان دستگاه بر روی کاغذ	۲	

عملکرد دستگاه تأیید می گردد.

دستگاه به سرویس و تعمیر نیاز دارد.

امضاء مسئول واحد مهندسی پزشکی

امضاء تکمیل کننده فرم